

Instructions d'emballage

Pour échantillons tissulaires FoundationOne® CDx

Cet emballage est utilisé pour l'envoi d'un échantillon tissulaire (bloc FFPE ou Lames) d'un patient pour analyse par Foundation Medicine®.

CONTENU DE LA BOITE



1 x support en mousse avec 3 portes lames pour 5 lames



1 x sachet « risque biologique »



1 x enveloppe transporteur



1 x poche réfrigérante de gel eutectique


ETAPES

ETAPE 1



Insérer les lames préparées dans les portes lames (5 lames maximum par porte lames)

ETAPE 2

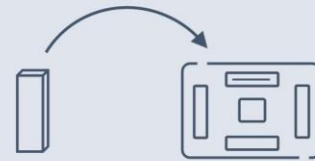

Caler les portes lames (ou bloc) dans le support en mousse

ETAPE 3



Placer le support en mousse dans le sachet « risque biologique »

ETAPE 4



Placer le sachet « risque biologique » contenant les échantillons dans le kit puis couvrez-le avec la poche réfrigérante


ETAPE 5

Placer dans le kit le document :

- TRF (= formulaire de demande)

Remettre en main propre au transporteur :

- Le document de transport (Airwaybill)

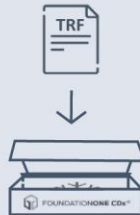

ETAPE 6



Placer le kit fermé dans l'enveloppe transporteur